

# Schermo facciale adulti - Libretto d'uso e manutenzione

Lo schermo facciale FPSR01 è un dispositivo di protezione individuale di II categoria prodotto dalla RO-FLA s.r.l. in conformità ai requisiti della norma UNI EN 166:2004 e del regolamento (UE) 2016/425.


Lo schermo facciale FPSR01 è progettato e testato per assicurare una adeguata protezione degli occhi e del volto contro:

- goccioline e spruzzi di liquidi, anche biologici
- colpi di lieve entità

## CAMPO DI UTILIZZO

Lo schermo facciale FPSR01 è progettato per l'impiego in attività lavorative che presentano un rischio chimico e biologico; ovvero che comportano l'esposizione a goccioline o spruzzi di liquidi potenzialmente caratterizzati dalla presenza agenti patogeni quali batteri, parassiti, virus, funghi (agenti biologici del gruppo 2 e 3 in riferimento all'Allegato XLVI del D.lgs 81/2008)

## COMPOSIZIONE

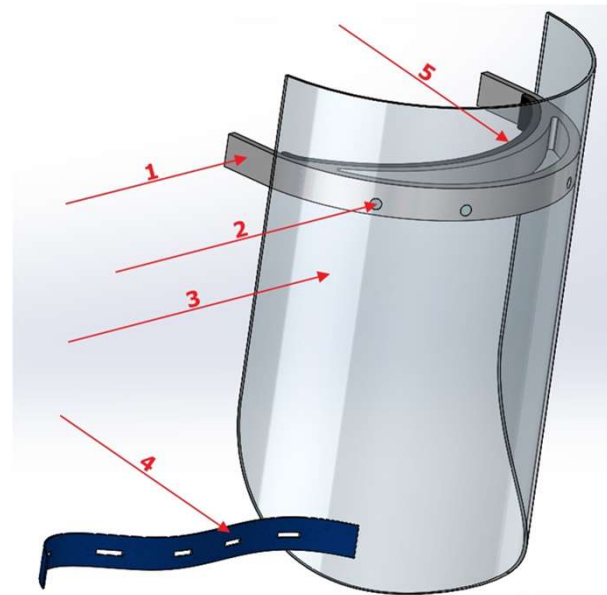

1: TELAIO; 2: PERNO; 3: OCULARE; 4: FASCIA ELASTICA CON ASOLE; 5: FASCIA TERGISUDORE ADESIVA



### ATTENZIONE:

I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore potrebbero causare reazioni allergiche agli individui sensibili.

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Fissare l'oculare (3) al telaio inserendo i perni (2) negli appositi fori ricavati sull'oculare.
- Fissare la fascia elastica al telaio inserendo i perni (2) nelle apposite asole (4) partendo dall'aggancio rettangolare all'estremità del telaio. La fascia elastica dovrà risultare ancorata al telaio sul lato frontale e sovrapposta all'oculare.
- Applicare la fascia tergisudore (5) servendosi dell'apposito adesivo.

### ISTRUZIONI D'USO

Posizionare lo schermo in modo tale che la fascia tergisudore (5) sia poggiata sulla fronte.

Dopo aver completamente cinto il capo con la fascia elastica, utilizzare gli appositi perni (2) per assicurare la fascia elastica al telaio (1) garantendo così la stabilità dello schermo facciale quando indossato.

### ACCESSORI E RICAMBI

- FASCIA TERGISUDORE - Codice articolo ROEL001T
- OCULARE - Codice articolo ROPC001

### PROCEDURA DI SOSTITUZIONE FASCIA TERGISUDORE:

Rimuovere la vecchia fascia tergisudore, quindi applicare la nuova fascia tergisudore servendosi dell'apposito adesivo.

Usare solamente ricambi originali RO-FLA s.r.l.



### ATTENZIONE:

Prima dell'utilizzo accertarsi che lo schermo sia integro. Se l'oculare risulta graffiato o danneggiato deve essere sostituito.



### ATTENZIONE:

Prima dell'utilizzo accertarsi che lo schermo sia pulito. In caso di contaminazione con sostanze estranee occorre prevedere la pulizia prima dell'utilizzo.

### PULIZIA E DISINFEZIONE

La pulizia dello schermo facciale deve essere effettuata con detergente non aggressivo, servendosi di un panno morbido, privo di peluria. La disinfezione dello schermo facciale deve essere effettuata servendosi di soluzioni igienizzanti a base alcolica e di un panno morbido, privo di peluria oppure di salviettine monouso.

### CONSERVAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Conservare lo schermo facciale all'interno della propria confezione in un luogo asciutto e al riparo da luce solare diretta, da radiazioni ottiche, da fonti di calore e da sostanze corrosive. Non schiacciare lo schermo facciale con oggetti pesanti.

Temperatura ottimale di conservazione: (20 ± 15)°C

Umidità relativa ottimale di conservazione: < 60%

### SCADENZA

Il prodotto può essere utilizzato per 5 anni a partire dall'acquisto purché conservato nell'imballo originale e nelle condizioni di cui al paragrafo "Conservazione e immagazzinamento".

### SMALTIMENTO

OCULARE: raccolta plastica

TELAIO: raccolta plastica

FASCIA ELASTICA E FASCIA TERGISUDORE: raccolta indifferenziata

### RIUTILIZZO

Lo schermo è riutilizzabile finché mantiene la propria integrità. L'uso da parte di diversi utilizzatori è consentito purché lo schermo facciale venga preventivamente sanificato secondo le modalità illustrate nel paragrafo "Pulizia e disinfezione".

### CERTIFICAZIONE

Lo schermo facciale FPSR01 è realizzato secondo l'articolo 15 del Decreto Legge 18 del 17/09/2020 ed in conformità alla norma tecnica UNI EN 166:2004 e al regolamento (UE) 2016/425.

### MARCATURA

La marcatura dello schermo facciale è realizzata in conformità alla normativa UNI EN 166:2004.

**Marcatura dell'oculare: RF 1 S**

